

EVACUEREN, de kans is statistisch gezien klein.

Het komt echter vaker voor dan gedacht en in dat geval dienen personeel en hulpdiensten zeer snel en adequaat te handelen.

Bij brand telt echter iedere seconde, efficiënt en snel handelen is daarom van levensbelang, want snel evacueren redt levens

JARVEN RESCUE SHEETS dienen zich permanent onder de matrassen te bevinden en staan, in het geval van een calamiteit, daardoor garant voor een snelle en veilige evacuatie van immobiele bedlegerige patiënten.

JARVEN RESCUE SHEETS zijn gemaakt van een hoogwaardige kwaliteit röntgentransparant, zeer sterk en brandvertragend weefsel.

Glijden erg gemakkelijk op zowel een droge als een natte ondergrond.

EVACUATIEPLAN

Een goed evacuatieplan is van wezenlijk belang en er dient regelmatig geïfend te worden.

JARVEN RESCUE SHEETS worden geleverd met een instructie DVD.

IN NEGENTIG SECONDEN EVACUEREN



STEL EERST DE PATIËNT GERUST, HAAL VERVOLGENS DE KLITTENBANDEN VAN DE ONDER **JARVEN RESCUE SHEETS** HET MATRAS VANDAAN, ZORG ERVOOR DAT DE ARMEN VAN DE PATIENT GESTREKT ONDER DE DEKENS LIGGEN EN FIXEER DE PATIËNT DOOR DE KLITTENBANDEN OP ELKAAR TE BEVESTIGEN



LAAT, INDIEN MOGELIJK, HET BED ZAKKEN. PAK MET TWEE HANDEN DE HANDGREEP VAN DE **JARVEN RESCUE SHEETS** AAN HET VOETENEINDE EN DRAAI HET MATRAS MET DE PATIËNT 75° TOT 90° OP DE BEDBODEM EN TREK HET MATRAS MET DE PATIENT VAN HET BED AF.



U KUNT DE PATIËNT, MET BEHULP VAN DE **JARVEN RESCUE SHEET** SNEL EVACUEREN NAAR EEN VEILIGE PLEK VOOR EVENTUEEL VERDER TRANSPORT. TIJDENS DE EVACUATIE DIENT U ZOVEEL MOGELIJK (OOG) CONTACT MET DE PATIENT TE HOUDEN, DAT STELT GERUST.



SOMS MOET U, OMDAT DE LIFTEN NIET GEBRUIKT MOGEN WORDEN, TIJDENS DE EVACUATIE GEBRUIK MAKEN VAN EEN TRAPPENHUIS. HOUDT DE HANDGREEP VAN DE **JARVEN RESCUE SHEETS** MET ÉÉN HAND STEVIG VAST EN LOOP VERVOLGENS RUSTIG VAN DE TRAP AF.